

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ / คู่มือการใช้งาน (Instruction For Use / User manual)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name): โพลีเน็ต ซิงค์บอล (Polynet Syringe Ball)

ชื่อสามัญ (Generic Name): ลูกยางซิลิโคนดูดน้ำมูก Silicone Syringe Ball

รุ่น (Model): SSB-GRA, SSB-PUR, SSB-MGR

ลูกยางซิลิโคนสำหรับดูดจมูกทารกวัยขวบปีแรก เพื่อให้จมูกโล่งจากน้ำคร่ำหรือน้ำมูก

Silicone Syringe Ball is for sucking the nose of newborn baby. To keep the nose clear from amniotic fluid or mucus.

การออกแบบ : เพื่อป้องกันอันตรายต่อเยื่อจมูกที่มีผลให้เยื่อจมูกบวมและเลือดออก ได้ใช้วัสดุที่นุ่ม และส่วนปลายไม่เรียวเล็กไป จึงไม่สามารถสอดเข้าไปในรูจมูกของทารกแรกเกิดและทำอันตรายเยื่อ

Design : To prevent harm to the nasal mucosa that results in swelling and bleeding of the nasal mucosa. It uses soft materials and the tip not too slender. Therefore, it cannot be inserted into the newborn's nostrils and harm the mucosa.

วิธีการใช้:

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดส่วนบนของลูกยางให้ยุบ พร้อมจ่อปลายลูกยางให้แนบสนิทกับปีกจมูก


รูของปลายลูกยางตรงกับรูจมูก

ไม่สอดเข้ารูจมูก

เมื่อจะดูด ให้ปล่อยนิ้วหัวแม่มือที่กด

แรงดูดขึ้นกับแรงกดที่ส่วนบนให้ลูกยางยุบมากหรือน้อย การกดลูกยางมากเกินไป

อาจทำให้ลูกยางแยกจากกันและคืนตัวช้า

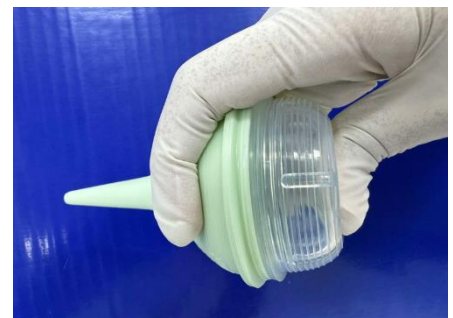

Instruction for Use

Use your thumb to press down on the top of the syringe ball to deflate it. Point the tip of the syringe ball close to the nose wing. The holes on the tip of the syringe ball correspond to the nostrils.

Do not insert into the nostril.

When sucking, release the thumb pressure.

The suction power depends on the pressure on the upper part to cause the syringe ball to deflate more or less. If pressing the syringe ball too much, this may cause the rubber ball to separate and recover slowly.



888 Moo. 11 Bangsaotong, Muang Samutprakarn 10570

Tel. 02-397-9094-6, Fax 02-397-9097

จำนวนบรรจุ (Packing size):

1 ชิ้น (1 pcs.)

การทำความสะอาดหลังใช้งาน

1. แยกลูกยางออกจากกัน ล้างด้วยน้ำสบู่
2. เช็ดด้วยผ้าสะอาดที่แห้ง หรือผึ่งแดดให้แห้ง
3. เมื่อแห้งแล้วเก็บในภาชนะสะอาดที่ปิดมิดชิด

Cleaning Instruction after Use

1. Separate the rubber balls from each other. Wash with soapy water.
2. Wipe with a clean, dry cloth or dry in the sun.
3. Once dry, store in a clean, tightly closed container.

วันที่เอกสาร พฤศจิกายน 2567 การแก้ไขที่ 01

DCC Date November 2024 Revision 01